

Checklist del paziente per la risonanza magnetica

Quando un medico richiede un esame di risonanza magnetica:

- ✓ Informare il medico che ha richiesto l'esame della presenza di un dispositivo di stimolazione del midollo spinale impiantato.
- ✓ Assicurarsi di avere il tesserino identificativo del paziente e il telecomando. Se non si dispone del tesserino identificativo del paziente, contattare il team di assistenza Nevro HFX.
- ✓ **Prima dell'esame di risonanza magnetica, tutti i pazienti portatori di un dispositivo HFX impiantato devono effettuare una verifica dell'impedenza.** Prima di prenotare l'esame, contattare il team di assistenza per il vostro dispositivo Nevro HFX. Il tecnico di radiologia e il team di assistenza Nevro HFX valuteranno i risultati prima dell'esame di risonanza magnetica.

Quando si prenota l'esame di risonanza magnetica:

- ✓ Comunicare quanto segue alla struttura sanitaria:
 - Informare della presenza di un dispositivo di stimolazione del midollo spinale Nevro HFX impiantato
 - Segnalare la presenza di eventuali altri dispositivi medici impiantati
 - Fornire una descrizione dettagliata del dispositivo, incluso il codice prodotto, gli elettrocatereteri e gli altri componenti dell'impianto (queste informazioni sono riportate sul tesserino identificativo del paziente)
 - I recapiti del medico che ha impiantato il dispositivo
 - Le linee guida per la risonanza magnetica, disponibili all'indirizzo www.Nevro.com/Manuals
- ✓ Queste informazioni consentiranno al medico e al tecnico di radiologia di determinare se è possibile sottoporsi all'esame in sicurezza.



PTRC1000



PTRC2300



PTRC2500



PTRC3000




Verificare che il dispositivo sia completamente carico prima di eseguire la scansione RM.

Per i pazienti portatori di impianto con telecomando

Checklist del paziente per la risonanza magnetica

Come prepararsi all'esame di risonanza magnetica:

- ✓ Contatta il tuo team di assistenza per il dispositivo Nevro HFX per confermare se puoi sottoporsi in sicurezza alla risonanza magnetica programmata.
- ✓ Il giorno dell'appuntamento, portare con sé il tesserino identificativo del paziente e il telecomando.
- ✓ Prima dell'esame, assicurarsi che l'IPG sia carico e verificare che la stimolazione sia disattivata. La stimolazione può essere disattivata con il telecomando.
- ✓ Una volta terminato l'esame di risonanza magnetica, riaccendere il sistema con il telecomando e contattare il medico o il team di assistenza Nevro HFX per verificare che il dispositivo sia programmato con le impostazioni presenti prima dell'esame.

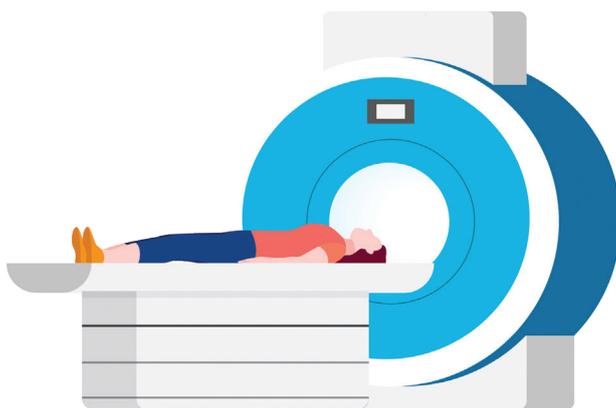

Serve aiuto?

Contattare il team di assistenza Nevro HFX di zona per individuare una struttura sanitaria in grado di eseguire l'esame di risonanza magnetica con impostazioni compatibili con i dispositivi di stimolazione del midollo spinale, oppure per chiedere informazioni e porre eventuali domande.



Linee guida per la risonanza magnetica per il tecnico di radiologia

Inquadrare questo codice per informazioni dettagliate sulla compatibilità con la risonanza magnetica oppure visitare [Nevro.com/manuals](https://nevro.com/manuals).

Nota. I sistemi HFX e HFX iQ sono approvati per l'esecuzione di scansioni di risonanza magnetica a determinate condizioni. Modelli diversi di dispositivi o elettrodi impiantati potrebbero avere condizioni di scansione approvate differenti. Leggere con attenzione le Linee guida per la risonanza magnetica di Nevro HFX insieme al medico, al tecnico di radiologia e al team di assistenza Nevro HFX prima di eseguire l'esame.

SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, il logo HF10, 10 kHz Therapy, HFX, il logo HFX, HFX iQ, HFX Algorithm, HFX CONNECT, il logo HFX Connect, HFX COACH, il logo HFX Coach, HFX CLOUD, il logo HFX Cloud, RELIEF MULTIPLIED, il logo X, NEVRO e il logo NEVRO sono marchi di fabbrica o registrati di Nevro Corp. ©2024 Nevro Corp. Tutti i diritti riservati.